

**Аннотация производителя по подготовке к использованию  
медицинских изделий согласно нормам DIN EN ISO 17664:2004**



Производ.: HAGER & WERKEN GmbH & Co. KG  
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg, Germany  
T +49 (203) 99269-0, F +49 (203) 299283  
www.hagerwerken.de

Изделие:  
**Spandex** **REF** 605 454; 605 455  
**Mirahold** **REF** 605 450; 605 451  
Пос.изменения: 04/2012 (Версия: 3)

**Меры предостережения:** особенных замечаний нет

**Ограничения в обработке:** обрабатывать макс. 50 раз.

**Обработка поверхности:** после использования протереть поверхности одноразовой салфеткой/полотенцем.

**Хранение и транспорт:** никаких особенных предписаний.

**Подготовка к обработке:** никакой.

**Очистка:** Использовать подходящие чистящие средства для покарбоната согласно инструкции производителя. После обработки чистящим средством, тщательно смыть его под струей воды. При машинной чистке, температура не должна превышать 93 °C.

**Дезинфекция:** Использовать подходящие дезинфекционные средства для поликарбоната согласно инструкции производителя. После обработки дезсредством, тщательно смыть его под струей воды. При машинной дезинфекции, температура не должна превышать 93 °C.

**Уход:** никаких особенных требований.

**Упаковка:** Рекомендуется использовать специальную упаковку при стерилизации.

**Автоклавирувание:** Автоклавирувать при 121 °C, 15 минут.

**Контроль/ проверка функциональности:** Общий осмотр на повреждение, загрязнение или износ.

**Хранение:** никаких особенных требований.

Выше перечисленные рекомендации производителя медицинских продуктов по подготовке медицинского изделия к повторному использованию, считаются наиболее ПОДХОДЯЩИМИ. Пользователь берет на себя ответственность за выбор подходящих средств и оборудования, и ее проведение, с целью достижения удовлетворяющих результатов. Любые отклонения от данной аннотации, должны быть тщательно проверены пользователем на действие и возможные последствия.

