

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор стоматологический для полирования и
препарирования зубов
методом абразивной струи
«ФЛОУ-КЛИНЗ»

для профилактической обработки зубов

ТУ 9391-011-67200978-2011

РУ № ФСР 2012/13178 от 29.09.2016 г.

ПОКАЗАНИЯ

Порошок № 1 Флоу-Клинз®-ПРОФИ предназначен для удаления налета и мягких отложений с наддесневой поверхности зубов, с оголенного корня; очистки фиссур перед герметизацией; удаления пигментаций, налета курильщика и щадящего отбеливания эмали, не приводящих к гиперестезии зубов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость. С осторожностью применять к пациентам с аллергическими реакциями на пищевые ароматизаторы.

Не использовать не по назначению.

ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Порошок № 1 Флоу-Клинз®-ПРОФИ применяется по методу пескоструйной обработки воздушно-водно-абразивной струей (Air-Flow). Порошок эффективно очищает твердые ткани, отбеливает и придает зубам здоровый блеск. В качестве абразивного компонента используется смесь карбоната и фосфата кальция с бикарбонатом натрия размером частиц 50-70 мкм, что позволяет провести щадящую чистку эмали. В составе содержится антислеживатель. Порошок выпускается с различными вкусами (мята, вишня, смородина, цитрус, мультифрукт) и нейтральный (без ароматизаторов).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Порошок № 1 Флоу-Клинз®-ПРОФИ применяют согласно инструкциям, прилагаемым к аппаратам пескоструйного типа для полирования зубов или к наконечникам импортного и отечественного производства.

Перед применением порошков необходимо врачу и пациенту защитить от пыли глаза очками и волосы одноразовой шапочкой, предупредить пациента с контактными линзами о возможном попадании пыли. Углы рта пациента следует обработать вазелином, поместить слюноотсос в угол рта пациента, использовать «пылесос».

Перед применением резервуар необходимо заполнить порошком на половину объема и подобрать режим подачи струи сжатого воздуха, воды и порошка, не направляя в полость рта пациента.

Не направляя струю порошка в одну точку, а распыляя круговыми движениями, следует обрабатывать каждую поверхность зуба не более 4 секунд.

Избегать попадания влаги в порошок!

По окончании работы необходимо очистить наконечник от порошка! Не оставлять порошок в резервуаре!

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок № 1 (банка) 250 г

Инструкция по применению 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

Транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.

Несоблюдение условий хранения и транспортирования ведет к ухудшению качества и сокращению срока годности материала, за что производитель ответственности не несет.

Храните материал в упаковке с инструкцией до окончания использования.

После вскрытия упаковки срок применения материала ограничен сроком годности.

Срок годности – 3 года от даты изготовления.

Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация материала должна проводиться согласно общим правилам организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ (для безопасных отходов класса А).