



Инструкция по применению

Флекс Флоу

Материал пломбировочный временный светового
отверждения текучей консистенции

ТУ 9391-030-40151387-2015

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: РЗН 2016/3919 от 05.04.2016

Торговое название: «Флекс Флоу»

СОСТАВ: олигоуретан, триэтиленгликоль диметакрилат, бутилированный гидрокситолуол, камфорохинон, триметакрилат триэтанолламин, бариевое алюмоборосиликатное стекло, силан, аэросил, пигменты железоокисные.

НАЗНАЧЕНИЕ:

«Флекс Флоу» материал временный пломбировочный светового отверждения текучей консистенции предназначен для использования:

в терапевтической стоматологии:

- для временного пломбирования полостей зубов, особенно в случаях, когда стенки полости истончены;
- для временного пломбирования при восстановлении полости вкладкой, изготовленной непрямым методом;
- для временного пломбирования при отсроченном лечении до 3-х месяцев;

в ортопедической стоматологии:

- для герметизации винта абатмента в технике создания ортопедических конструкций на имплантатах.

СВОЙСТВА

«Флекс Флоу» -полимерный материал с высокой текучестью до отверждения и высокой эластичностью после отверждения. В неотвержденном виде материал «Флекс Флоу» представляет собой однородную пасту текучей консистенции без вздутий, сухих мест, следов пигмента и посторонних примесей, консистенция 35-40 мм, глубина отверждения за 10 сек. не менее 3 мм, водопоглощение не более 50 мкг/мм³. Эти свойства материала обеспечивают герметичное закрытие полости и возможность удаления временной пломбы без применения вращающихся инструментов, с помощью экскаватора или зонда. Отверждается материал светом длиной волны 450+500нм. Цвет материала соответствует шкале расцветки VITA, выпускается цветов: A1, A2, A3, B1, B2.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал «Флекс Флоу» вносится в высушенную полость зуба одной порцией и отверждается светом. Рекомендуется отверждать под матрицей, пропускающей световой поток. Время отверждения зависит от толщины слоя материала. Рекомендуемое время отверждения 30-40 секунд. При закрытии глубоких полостей (более 5 мм) время отверждения необходимо увеличить.

Временная пломба не должна входить в окклюзионный контакт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Материал пломбировочный временный светового отверждения текучей консистенции «Флекс Флоу» выпускается в составе:

- шприц с материалом одного из цветов A1, A2, A3, B1, B2 - не более 3 шт.
- насадки к шприцу не более - 9 шт.
- инструкция - 1 шт.
- потребительская тара - 1 шт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний нет.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Паста пломбировочного временного светового материала «Флекс Флоу» может вызвать аллергическую реакцию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

После работы с материалом тщательно мойте руки.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Материал «Флекс Флоу» в упакованном виде транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующий вид транспорта. Условия транспортирования по ГОСТ 15150-69 при температуре +(5+24)°С.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Шприцы с материалом должны быть закрыты сразу после использования, их необходимо хранить в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей помещении при температуре +(5+24)°С.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие материала «Флекс Флоу» требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных комплексах.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация насадок, шприцев и материала с истекшим сроком годности или пришедшим в негодность по каким-то иным причинам, должна проводиться путем сбора материала в контейнер с последующим вывозом специализированными предприятиями.

Наименование и адрес предприятия-производителя /организация, принимающая претензии:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТОМАТОЛОГИЯ ДЕНТИСТРИ» (ООО «СТОМАДЕНТ»),
140070, Россия, Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гаршина, дом 11.

Телефон/факс: +7(495) 514-93-46, тел.: +7(495) 514-93-47/48;

E-mail: info@stomadent.ru, www.stomadent.ru