

ДЕНТЛАЙТ-колор



Цветокорректор светового отверждения

НАЗНАЧЕНИЕ

Создание оттенков и тонирование различных участков композитной реставрации (режущий край, пришеечная область, фиссуры и т.д.).

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Цветокорректоры «ДентЛайт»-колор представляют собой низковязкие интенсивно окрашенные светоотверждаемые микронаполненные композитные пасты различных цветов, совместимые со всеми светоотверждаемыми реставрационными композитами.


Цветокорректоры «ДентЛайт»-колор позволяют расширить цветовую гамму реставрационных материалов и придать еще большую естественность реставрации.



ПРИМЕНЕНИЕ

При последовательном комбинировании разных оттенков композитного материала в процессе реставрации, цветокорректор наносят между слоями композита и отверждают в течении 40 сек.

начальный пульпит (вид до препаровки)

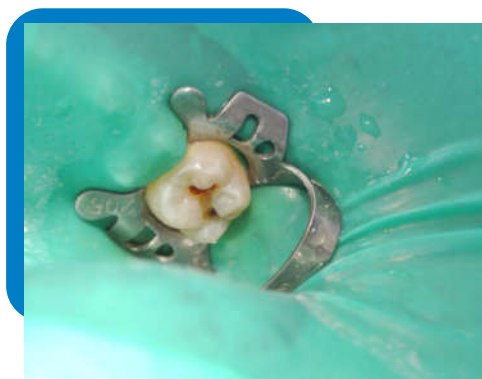

окончательная реставрация
(фиссуры оттонированы «ДентЛайт» -колор)



ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000008906 00000009301 00000009302	Паста Белый Коричневый Охра	1 мл